

STEPTY™

Sterilní adhezivní náplast s tlakovým hemostatickým polštářkem zajišťuje rychlou a účinnou hemostázu po odstranění cévních vstupů a odběrových jehel větších průměrů (14 - 24 gauge).



Hemostatický polštárek s výškou 6 mm má vynikající schopnost absorpce a komprese díky netkané uretanové náplasti s potřebnou elasticitou.

Vlastnosti

- polštárek s výškou 6 mm zaručuje vynikající absorpci krve
- 27 mm dlouhý polštárek spolehlivě zakryje celou oblast vpichu kůže i cévy
- oválný tvar stimuluje prokrvení pokožky
- náplast z netkané uretanové textilie má vysokou elasticitu a flexibilitu
- koeficient tvarové paměti nad 90% garantuje vynikající tlakovou imobilizaci
- šířka náplasti a čtyřrozměrná pružnost zajišťuje spolehlivé krytí polštářku
- hypoalergenní akrylové adhezivum je šetrné k pokožce




Oblasti použití


- hemostáza a překrytí periferních cév při odběru krevních vzorků
- hemostáza a překrytí periferních cév při infuzích, dialýze, v průběhu operací po anestezii atd.




■ Postup při použití

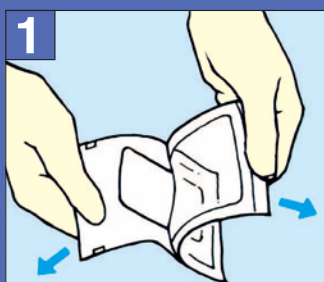


1 Otevřete sterilní balení [průhlednou stranou nahoru] a vyndejte STEPTY™.

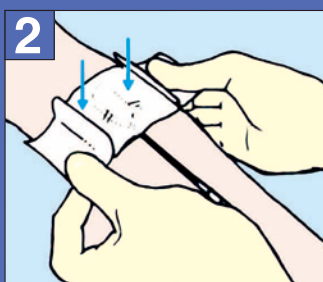


2 Před vytažením jehly nebo katetru natočte náplast delší stranou polštářku ve směru cévy. Střed polštářku přiložte na místo vpichu a lehce přitlačte lepicí plochou v těsném okolí polštářku.

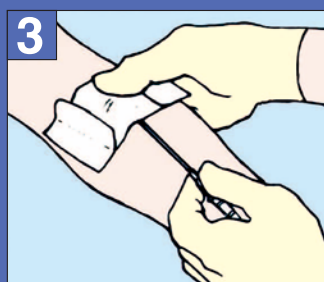

3 Palcem lehce přitlačte polštářek a vyndejte jehlu nebo katetr.

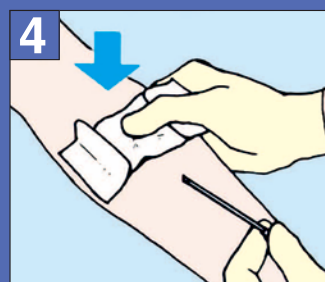


4 Při vytahování jehly nebo katetru silně přitlačte polštářek na místo vpichu.

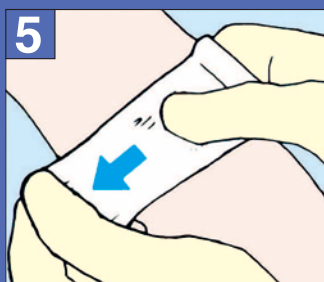


5 Přidržte palcem polštářek pevně na místě vpichu a druhou rukou natáhněte náplast cca o 1 cm, odstraňte krycí papír a lepicí plochu pevně přitlačte na pokožku.



6 Opatrně, tak abyste při zachování pevného tlaku polštářek neposunuli, vyměňte palce.

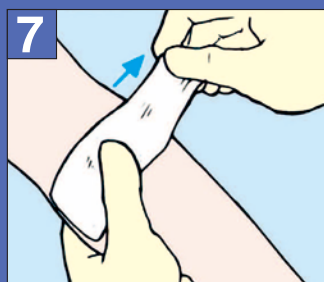

7 Při zachování pevného tlaku natáhněte druhou rukou opačný konec náplasti cca o 1 cm, odstraňte krycí papír a lepicí plochu pevně přitlačte na pokožku.

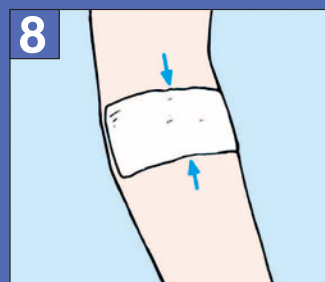

8 Obrázek ukazuje STEPTY™ po aplikaci. Tlakový polštářek je oboustranně pevně fixovaný lepicí plochou náplasti.

■ Specifikace

Objednávkový kód	Popis produktu		Balení	Barva
	rozměr náplasti	rozměr polštářku		
80A	39 mm x 80 mm	27 mm x 15 mm	50 ks	běžová